

GEBRAUCHSANWEISUNG

SWASH[®] FOOT CAP

Produkt Nummer: Eo4034-2

Hilfsmittel:

- Einweghandschuhe
- Abfalleimer
- 2 Handtücher
- Mikrowelle (falls erforderlich)

Instructions for use:

Setzen Sie eine Fußkappe auf jeden Fuß des Patienten. Lassen Sie das Produkt min. 2 Min. und max. 15 Min. auf den Füßen. Sie können jeden Fuß durch die Fußkappe massieren. Nehmen Sie die Fußkappen ab. Ein Abwaschen ist nicht erforderlich. Trocknen Sie die Füße mit einem Handtuch ab. Keine zusätzliche Lotion erforderlich. Eine detaillierte Vorgehensweise wird im Folgenden beschrieben.

Detaillierte Vorgehensweise:

Swash[®] Foot Cap kann zentral auf der Station oder neben dem Bett des Pflegebedürftigen gelagert und sowohl erwärmt als auch bei Raumtemperatur verwendet werden.

- 1 Falls gewünscht, erwärmen Sie die Swash[®] Foot Cap auf die gewünschte Temperatur. Die empfohlene Temperatur erreichen Sie, indem Sie die Packung bei maximal 800 Watt für 30 Sekunden in der Mikrowelle erwärmen.
- 2 Erklären Sie der pflegebedürftigen Person, was Sie vorhaben und reden Sie während des gesamten Waschvorgangs mit ihm/ihr.
- 3 Waschen Sie Ihre Hände bevor Sie beginnen und ziehen Sie sich die Einweghandschuhe an.
- 4 Wenn möglich, bringen Sie die pflegebedürftige Person in eine bequeme sitzende oder liegende Position.
- 5 Legen Sie optional ein Handtuch unter die Füße auf die Oberfläche, auf der die Füße liegen sollen, um zu verhindern, dass die Oberfläche nass wird.
- 6 Öffnen Sie die Packung und prüfen Sie die Temperatur der Fußkappen. Denken Sie daran, dass die Einweghandschuhe Ihre Hitzeempfindlichkeit verringern.
- 7 Entnehmen Sie die 2 Fußkappen aus der Verpackung. Setzen Sie auf jeden Fuß eine Kappe auf. Lassen Sie das Produkt mindestens 2 Min. und maximal 15 Min. lang auf den Füßen einwirken. Die Einwirkzeit hängt von der erforderlichen Einweichdauer und dem Hautzustand ab.
- 8 Die Füße mit den Fußkappen können mit einem Handtuch abgedeckt werden, um ein schnelles Auskühlen des Produkts zu verhindern.
- 9 Massieren Sie jeden Fuß sanft durch die Fußkappe, um eventuellen Schmutz und abgestorbene Haut zu entfernen.
- 10 Nehmen Sie die Fußkappen ab, trocknen Sie die Füße gründlich mit einem Handtuch und achten Sie darauf, dass auch der Raum zwischen den Zehen trocken ist. Keine zusätzliche Lotion erforderlich.
- 11 Untersuchen Sie den Zustand der Haut.
- 12 Entsorgen Sie die leere Swash[®]-Verpackung und die Fußkappen im Abfalleimer. Achtung: Die Fußkappen dürfen NIEMALS IN DER TOILETTE entsorgt werden!
- 13 Fall erforderlich, notieren Sie eventuelle Anmerkungen.

ACHTUNG:

- Nehmen Sie zu jeder Zeit Rücksicht auf die Gefühle, das Wohlbefinden und die Privatsphäre der pflegebedürftigen Person.
- Jede Packung darf nur für **eine** Person verwendet werden.
- Nur zur äußeren Anwendung vorgesehen.
- Wenn Sie die Swash® Fußkappen in Übereinstimmung mit den Anweisungen auf der Packung erwärmen, ist es wichtig, die Temperatur der Kappen zu prüfen, bevor sie auf der Haut angewendet werden. Sind die Swash® Fußkappen zu heiß, dürfen sie nicht sofort verwendet werden. Denken Sie daran, dass das Tragen von Einweghandschuhen Ihr Hitzeempfinden verringert. Prüfen Sie die Temperatur insbesondere bei Personen, die nicht reagieren können oder bei Personen, die eine empfindliche Haut haben.
- Nicht mit den Fußkappen laufen.
- Nur zum einmaligen Gebrauch.
- Nicht wiederverwenden.
- Nicht wieder erwärmen.
- Nicht überhitzen.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Nicht steril. Nur auf intakter Haut verwenden.
- Nicht auf offenen Wunden anwenden.
- Nicht auf empfindlicher Haut anwenden. Im Zweifelsfall einen Arzt oder Podologe konsultieren.
- Nicht bei Kindern anwenden.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **Entsorgen Sie die Fußkappen nicht in der Toilette. Entsorgen Sie die leere Swash®-Verpackung und die Fußkappen im Abfalleimer.**

GEGENANZEIGEN:

- Wenn der Pflegebedürftige die Anwendung ablehnt
- Wenn bekannt ist, dass der Pflegebedürftige empfindlich oder allergisch auf einen oder mehrere der Inhaltsstoffe reagiert
- Auf nicht intakter Haut und offenen Wunden

PIKTOGRAMME AUF DER VERPACKUNG:

	Temperaturbegrenzung		UDI Nummer (Unique device identifier)
	Vor Lichteinstrahlung schützen		Innerhalb von 48 Std. aufbrauchen
	Vor Nässe schützen		In den Mülleimer werfen
	Nicht verwenden wenn Verpackung beschädigt ist. Gebrauchsanweisung beachten.		Nicht auflösend
	Nicht zur Wiederverwendung		Hinweis zum Erwärmen
	Nicht steril		Frei von Latex
	Medizinprodukt		In Clean Room produziert
	Konformitätszeichen		Das Produkt enthält keine Duftstoffe
	Chargennummer		Das Produkt enthält Duftstoffe
	Hersteller		Nicht in Toilette entsorgen
	Verwendbar bis		Gebrauchsanweisung oder elektr. Gebrauchsanweisung beachten

Die Informationen in dieser Anweisung gelten insbesondere für die Verwendung der Swash® Foot Cap für das Waschen und baden der Füße. Gemäß den Anweisungen und Richtlinien in Ihrer Pflegeeinrichtung kann diese Anweisung um weitere Maßnahmen und Schritte ergänzt werden.